

Frein



Mettre le frein; mouvement du pied de haut en bas.



Relâcher le frein; même mouvement du pied de haut en bas.

Ecran



Tenez l'écran au milieu à deux mains et remonter-le progressivement.



Tenez l'écran en haut à deux mains et descendez-le progressivement.



Le bouton marche/arrêt se trouve sur le côté droit de l'écran.



L'écran peut être utilisé comme écran tactile. Même avec des gants.

Plan de travail



Le support pour clavier/souris est rétractable avec une partie pour la souris extensible à gauche ou à droite.



Le chariot informatique est réglable en hauteur. Appuyez sur la poignée et poussez vers le bas, ou tirez vers le haut, jusqu'à la hauteur désirée. Utilisez vos deux mains.

Alimentation



Vous n'utilisez pas le chariot ?

Branchez-le au réseau électrique.

Instructions de nettoyage chariot informatique et écran



Le chariot informatique peut être nettoyé avec les produits de nettoyage habituels.



L'écran peut être nettoyé avec un chiffon en microfibre et un produit de nettoyage non agressif (donc pas avec un produit alcoolique ou chlorhydrique). Appliquez le produit sur le chiffon et nettoyez l'écran.